

fixma

Protecteur pour plâtre et revêtement dentaire

Propriétés :

- ▶ Permet d'obtenir une surface de plâtre dure et hydrofuge
- ▶ Rend indélébile le marquage de vos modèles .
Les imperméabilise
- ▶ Donne une présentation parfaite à vos modèles en plâtre
- ▶ Durcit la surface des duplicata en revêtement
- ▶ Permet une bonne fixation des préformes en cire et en plastique

Mode d'emploi

Vaporiser à environ 25 cm du modèle. Commencez la vaporisation en dehors du modèle . Imprimez à la pulvérisation un mouvement lent et régulier . Deux ou trois couches légères sont préférables à une seule couche importante .
Laissez sécher 10 à 15 minutes.

Duplicata en revêtement : température de déshydratation 300° à 320° c pendant 15 à 30 minutes . Laissez refroidir le duplicata jusqu'à une température d'environ 50° à 60 ° c puis pulvérisez .

Fixma constitue une protection inaltérable



Conditionnement : 500 ml l

Code article : AD 7810

ULTIMA Administration et Usine
 ZA la Suzerolle • 49140 Seiches sur le Loir • France
 Tel +33 (0)2 41 18 09 88 • Fax +33 (0)2 41 18 08 87 • ultima.lp@wanadoo.fr

ULTIMA
 Plâtres & Minéraux