

# FIXMA

Protecteur pour plâtre et revêtement dentaire



## Propriétés :

- ⇒ Permet d'obtenir une surface de plâtre dure et hydrofuge
- ⇒ Rend indélébile le marquage de vos modèles . Les imperméabilise
- ⇒ Donne une présentation parfaite à vos modèles en plâtre
- ⇒ Durcit la surface des duplicata en revêtement
- ⇒ Permet une bonne fixation des préformes en cire et en plastique

## Mode d'emploi

Vaporiser à environ 25 cm du modèle. Commencez la vaporisation en dehors du modèle . Imprimez à la pulvérisation un mouvement lent et régulier . Deux ou trois couches légères sont préférables à une seule couche importante . Laissez sécher 10 à 15 minutes.

Duplicata en revêtement : température de déshydratation 300° à 320° c pendant 15 à 30 minutes . Laissez refroidir le duplicata jusqu'à une température d'environ 50° à 60 ° c puis pulvérisez .

**Fixma** constitue une protection inaltérable

Code article AD7810 - 500 ml