

PLASTIPLATRE

solution autoplastifiante



Mode d'emploi

Cette solution s'utilise en remplacement de l'eau lors de la préparation .
Augmenter la dose de liquide par rapport à la quantité d'eau utilisée

1/2 EAU - 1/2 PLASTIPLATRE : Pour la réalisation de la prothèse fixée, plus spécialement avec le Galaxy et le Krypton .

Dans ce cas, l'utilisation du Plastiplâtre n'est vraiment nécessaire que si la prothèse n'est exécutée que 4 ou 5 jours après la coulée de l'empreinte en plâtre .

Attention : Le PLASTIPLATRE ne doit être utilisé, dans la gamme des plâtres ULTIMA , qu'avec le GALAXY , le NOVADUR ou le KRYPTON .

le malaxage sous vide est indispensable

Contenance 1000 ml - Ref ADPLAST1000